



非洲猪瘟病原检测量子点检测卡说明书

产品简介

本产品为非洲猪瘟病原检测量子点检测卡，检测血清样品中非洲猪瘟病原的残留。整个检测过程需要 8 分钟。

产品组成

非洲猪瘟病原检测量子点检测卡（50 个/盒）；样品稀释液样本稀释液(150ul/管)。

操作方法

1. 用吸管吸取一滴（约 30 微升）血清滴入稀释液中混匀，全部吸取约 200 微升加入检测卡加样孔中。
2. 放入 37°C 孵育器中孵育 8 分钟判断结果

结果判定

1. 阳性：在荧光灯照射观察，若 C 线显色，T 线同时显色，判为阳性。
2. 阴性：在荧光灯照射观察，若 C 线显色，而 T 线不显色，判为阴性。
3. 无效：在荧光灯照射观察，若 C 线不显色，则结果无效，建议重新测试。

操作规程

1. 在进行测试前先完整阅读使用说明书，使用前将样品稀释液恢复至室温。

2. 提前打开孵育器预热到 37℃。
3. 拉出孵育器槽，将检测卡平放于孵育器槽内靠里侧，用吸管吸取待检样品溶液到检测卡的加样孔中静止 10 秒，然后将槽推进孵育器内孵育。
4. 记时 8min，孵育完毕后取出检测卡，请于 1 分钟内观察结果。

注意事项

1. 检测卡请在保质期内一次性使用,不同批次的检测卡和稀释液不能混用。
2. 稀释液里含有特殊成分，不可以直接滴加稀释液测试检测卡，此结果无效。
3. 样品稀释液如果超过 1 周不使用请置 2-8 摄氏度保存，用前恢复至室温再使用；
4. 不要触摸检测卡中央的白色膜面，以免受污染后影响检测结果的准确性；
5. 检测卡铝箔包装袋打开后请立即使用,以免检测卡受潮影响检测结果；

储存及有效期

本产品应储存于 2-25℃，阴凉避光干燥处,切勿冷冻;具体有效期及批号见试剂盒外包装。

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com